



Brugermanual

FISK


BRUGERMANUAL – FISK – DK VERSION 1

Læs brugermanualen nøje igennem, før du anvender produktet. Vær opmærksom på alle anvisninger og følg dem.

Max belastning FISK: 150 kg.

Højdeindstilling af sæde:

- Placér Dem i siddestilling på skamlen, og grib fat om gasfjederens udløserarm (A), som sidder i højre side lige under det polstrede sæde.
- Træk opad i udløserarmen – hermed udløses låsen på gasfjederen.
- Ønskes sædehøjden øget, let presset af vægt på sædet – indtil den ønskede sædehøjde er nået. Slip derefter udløserarmen (A)
- Ønskes sædehøjden reduceret, øges presset af vægt på sædet – indtil den ønskede sædehøjde er nået. Slip derefter udløserarmen (A). Max. 150 kg.

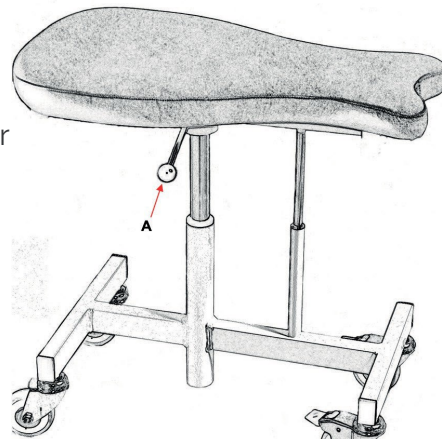

Vær opmærksom på øget tipningsfare ved låste hjul.

Vedligeholdelse & Rengøring

1. Efterse jævnligt sædet og dets fastspænding.
2. HJULENE tjekkes med jævne mellemrum – efterspændes om nødvendigt – og skal holdes fri for bl.a. hår for at bevare den optimale køreevne.
3. Udskift slidte eller ødelagte dele:
HELLERE ÉN GANG FOR MEGET END ÉN FOR LIDT!
4. Rengøring foretages med almindelige ikke-ætsende rengøringsmidler.

Danrehab A/S, Vejlevej 15, 7160 Tørring erklærer på eget ansvar, at FISK, som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med EU-Direktiv 2007/47/ EC, DIN EN ISO 12182.



