

FISK

HMI-NR. 24726

BRUGSVEJLEDNING


WWW.DANREHAB.DK



Læs brugsvejledningen nøje igennem, før du anvender produktet.
Vær opmærksom på alle anvisninger og følg dem.

Max belastning: 150 kg.

Højdeindstilling af sæde

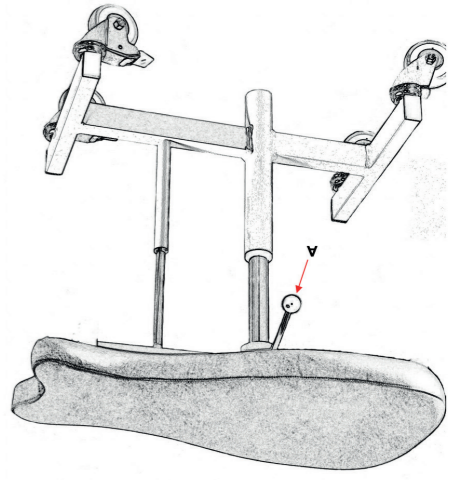

- a. Placer Dem i siddestilling på skamlen, og grib fat om gasfjederens udløserarm (A), som sidder i højre side lige under det polstrede sæde.
- b. Træk opad i udløserarmen - hermed udløses låsen på gasfjederen.
- c. Ønsker De sædehøjden øget, let presset af Deres vægt på sædet, indtil den ønskede sædehøjde nås. Slip derefter udløserarmen (A).
- d. Ønsker De sædehøjden reduceret, øges presset af Deres vægt på sædet, indtil den ønskede sædehøjde nås. Slip derefter udløserarmen (A). Max. belastning: 150 kg.
- e. Vær opmærksom på øget tipningsfare ved låste hjul.

Vedligeholdelse

.. Efterse jævnlgt sædet og dets fastspænding.

.. Hjulene tjekkes regelmæssigt og efterspændes om nødvendigt. De skal holdes fri af hår for at bevare deres optimale køreevne.

.. Udskitf slide eller ødelagte dele:

HELLERE ÆN GANG FOR MEGET END EN FOR LIDT !

.. Rengøring foretages med almindelige ikke-ætsende rengøringsmidler.

dan-rehab a/s, Messingvej 13-15, DK-8940 Randers SV, erklærer på eget ansvar, at FISK, som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med EU-Direktiv 2007/47/EC, DIN EN ISO 12182.