


Brugsvejledning fodhvilere 01051-ET11

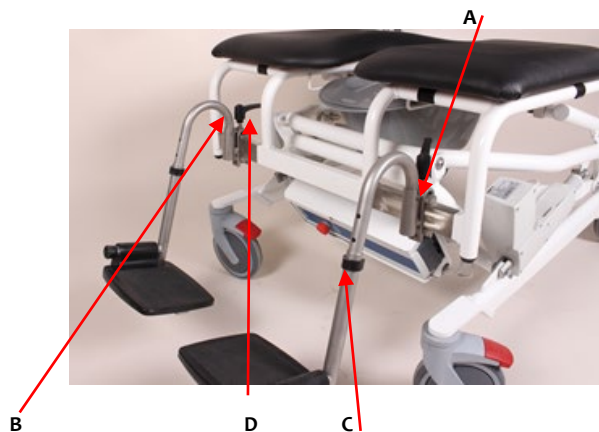

Et fodhvilerpar består af to højdeindstillelige fodhvilere (én til højre og én til venstre fod).

1. Anbring fodhvileren i beslaget (A), som er svejset på stolens forkant. I hver side af beslaget er en slids, som fodhvilerens ”knopper” glider ned i og derved låser fodhvileren for sidedrej.



Disse slidser kan have skarpe kanter, som man kan rive sig på ved et uheld, når fodhvilerne ikke er monteret på en stol.

2. Ønskes fodhvileren svinget ud til siden, **løftes** fodhvileren godt 1 cm lodret - nemmest i krumningen (B): Herved glider fodhvilerens ”knopper” op af slidserne, og fodhvileren kan nu drejes til siden.
3. Fodhvileren kan indstilles i længden ved at **fjerne** dens låseclip (C) og derefter **trække** eller **skubbe** fodhvilerens inderrør til den ønskede længde.
HUSK: Fodhvilerens låseclip sættes på plads igen efter indstillingen.
4. Fodhvilerne kan indstilles i bredden ved at løsne håndtaget (D) og når fodhvileren ikke sidder stramt på stolens forkant, kan fodhvilerens placering justeres. **HUSK** at spænde håndtaget (D) igen efter endt justering. Fodhvilerne kan forsynes med et lægbånd (model **01052-ET11**)



Under indstillingen skal man tage hensyn til den klemrisiko, der altid er til stede.

danrehab a/s, Vejlevej 15, DK-7160 Tørring, erklærer på eget ansvar, at **ERGOTip 11 EL**, som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med MDR (EU)2017/745 vedr. medicinsk udstyr. DIN EN ISO 12182.

danrehab

ERGOTip 11 EL HMI-nr. 109635
(IP X6 klassificeret)
QUICK-GUIDE



OPLAD STOLENS BATTERI FØR IBRUGTAGNING.



ERGOTip 11 EL skal anvendes på vandrette underlag – stolen må **aldrig** bruges på skrånende underlag.


HVIS stolen anvendes til **patienttransport** gælder følgende forholdsregler:

- a. Stolen må IKKE være fremadklippet
- b. Stolen skal være i LAVESTE position
- c. Udvis største forsigtighed ved kørsel over fx dørtrin o. lign.
- d. Læs brugsvejledningen nøje igennem, før du anvender produktet. Vær opmærksom på alle anvisninger og følg dem. Opbevar brugsvejledningen sammen med stolen.
Max. belastning: 275 kg.

ERGOTip 11 EL er CE-mærket, testet og godkendt i henhold til ISO/EN 12182:2012.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:

Ved usædvanlige lyde og/ eller evt. ujævn motorgang **STANDESE** tilingen. Kontakt evt. en fagmand eller forhandleren/ producenten. Rengøring foretages med ikke-ætsende rengøringsmidler, hvorefter stolen spules. Den efterfølgende aftørring sker bedst med en blød klud. Armlæn, ryglæn, sæde og hjul kontrolleres med jævne mellemrum – efterspændes eventuelt – og holdes fri for hår m.m. for at bevare den optimale køreevne.

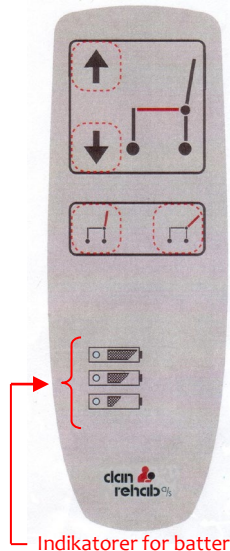

Indikatorer for batteriniveau

HVORDAN TIPPES STOLEN BAGUD:

Tryk på den **højre** af håndbetjeningsboksens taster i den **nederste** række knapper, **tip** stolen til den ønskede siddeposition. **Slip** tasten:

STOLEN ER NU FASTLÅST I STILLINGEN.

ØR tipning påses, at spanden er skubbet ind forbi det lodrette rørstykke på bakkenglideren, så den ikke falder ud ved tipningen.

HVORDAN TIPPES STOLEN FREMAD:

Tryk på den **venstre** af håndbetjeningsboksens to taster i den **nederste** række knapper, **tip** stolen til den ønskede siddeposition. **Slip** tasten igen.

STOLEN ER NU FASTLÅST I DENNE STILLING.

Ved brugers ind-/udstigning i/fra stolen samt ved tipning **SKAL** det sikres, at stolens hjul er aflåst, og at hjulenes bremsepedaler **IKKE** "peger" ind under stolen!

HVORDAN INDSTILLES SÆDEHØJDEN:

Tryk på den **øverste** af tasterne i **øverste** firkant på håndbetjeningen, og **hæv** stolen til den ønskede højde. **Slip** tasten igen:

STOLEN ER NU FASTLÅST I STILLINGEN.




STANDS ØJEBLIKKELIGT, HVIS STOLEN KØRER SKÆVT OP! Konsultér fejlsøgningsskemaet på www.danrehab.dk eller ring til Teknisk Support på tlf. 86 44 73 55.

Tryk på den **nederste** af de to taster i den **øverste** firkant på håndbetjeningen for at **sænke** stolen til en ønsket sædehøjde. **Slip** tasten igen: **STOLENS POSITION ER NU FASTLÅST.**


Ved brugers ind- og udstigning må særlig opmærksomhed vies til evt. tipningsfare.

STÅ ALDRIG PÅ FODHVILERNES FODPLADER!

Hvis brugeren læner sig kraftigt fremad, kan der opstå tipningsfare, hvis forhjulene ikke er låst, og hvis bremsepedalerne ikke peger væk fra stolen.

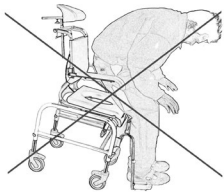

NØDSTOP og NØDFIR

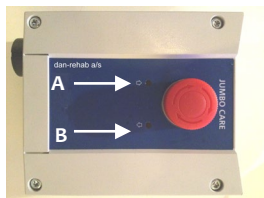

NØDSTOP: Tryk på den røde knap på **styreboksen**. Drej knappen til **højre** for at ophæve nødstoppet.


NØDFIR: Tryk let med fx en kuglepen i hullet ved **A** for at **hæve** stolen. Tryk let i hullet **B** for at **sænke** stolen.

HÅNTERING AF ARMLÆN



Vær opmærksom på potentiel klemning (A) af væv eller fingre ved nedfældning af armlæn.

OPLADNING KAN FORETAGES PÅ STOLEN - uden at fjerne batteriboksen fra stolen:

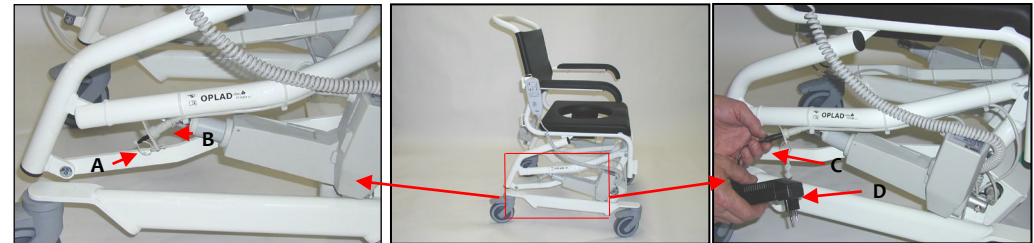

a. Fjern proppen **A** ved at trække den ud af stolens ladestik **B**.

b. Indsæt det runde stik **C** fra den medfølgende lader i stolens ladestik **B**. Sæt laderens anden ende **D** i en almindelig stikkontakt. Under opladning vil laderens lille pære lyse **gult**. Når opladning ikke længere er påkrævet, vil pæren lyse **grønt**.

Indsæt prop **A** i stolens ladestik **B** igen, når opladningen er slut.

C. Oplad batteriet **SENEST**, når indikatorerne for batteriniveaet skifter til det nederste af de tre niveauer.



Opladning må ikke foretages i vådrum, eller hvis stolen er våd eller med en bruger siddende i stolen. STOLEN MÅ IKKE ANVENDES UNDER OPLADNING!

OBS! Ved rengøring af stolen skal motorenes stempler være kørt HELT ind i "huset".

OBS! ERGOtip 11 er et redskab til professionel patient håndtering og vi anbefalerat produktet udelukkende bruges af faguddannet personale.

EXTRA TILBEHØR: Se www.danrehab.dk

danrehab a/s • Vejlevej 15 • dk-7160 Tørring
tlf. 8644 7355 • info@danrehab.dk • www.danrehab.dk