

Reagerer stolen ikke på højderegulerings- eller tipfunktionen ?

1. Undersøg, om de forskellige stik er sat rigtigt i.

Hvis NEJ, sæt stikkene i.

Hvis JA, så

2. Undersøg, om (den røde) nødstop-knap (på styreboksen) er trykket ind.

Hvis JA, drej nødstopet til siden, så udløser knappen sig selv.


3. Undersøg, om batteriboksen er skubbet ordentligt på plads:

Træk i batteriboksens håndtag og tag batteriet ud.

Tjek, at der i skinnen, som fastholder styre- og batteriboksen, ikke sidder et fremmedlegeme i klemme.

Sæt batteriboksen i skinnen igen:

- a. Placér først den ene ende (1) af batteriet i skinnen og derefter den anden ende af batteriet (2).

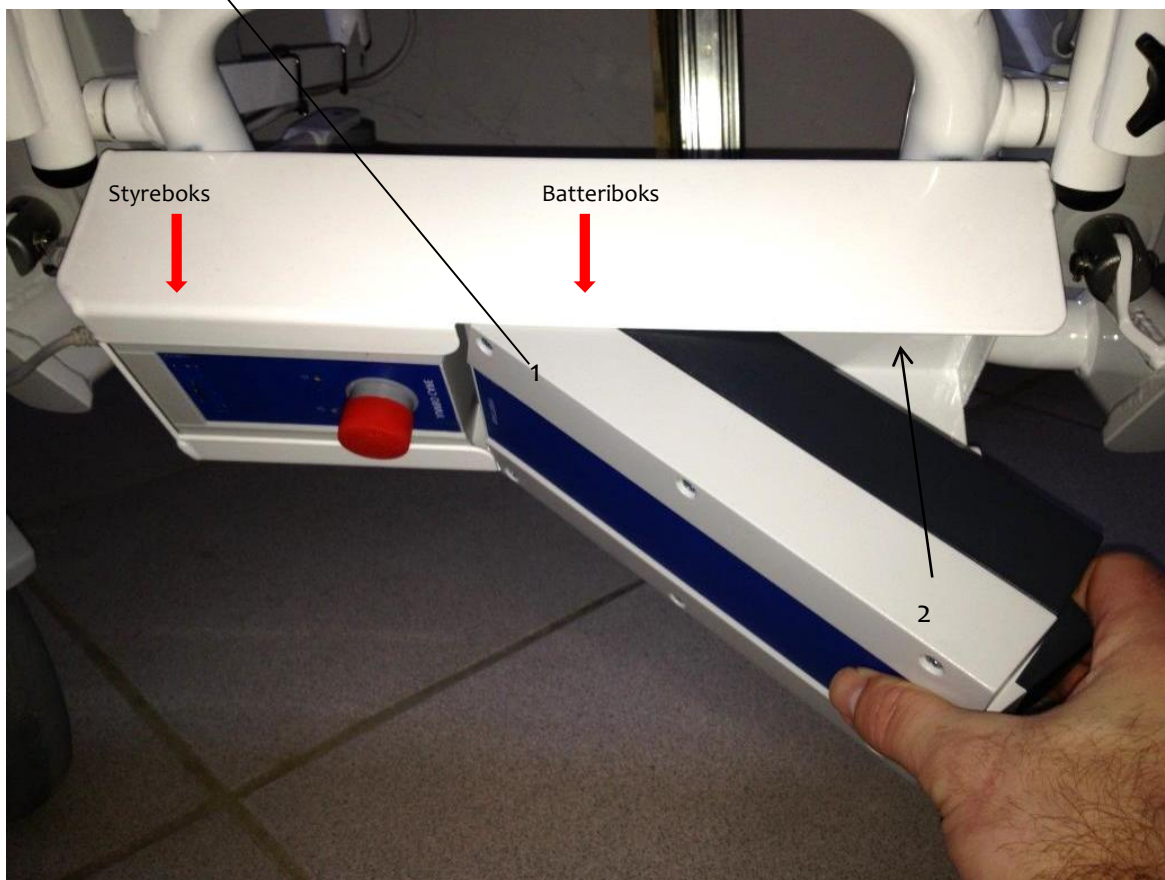

- b. Tryk dernæst med venstre hånd let på batteriboksens forside og skub samtidigt batteriboksen hen mod styreboksen med højre hånd. Der lyder et lille klik, når batteriboksen er på plads og sidder godt og fast.

4. Undersøg, om batteriindikatorerne på håndbetjeningen lyser.

Hvis den midterste lampe lyser (gult), **bør** batteriet oplades.

Hvis den nederste indikator lyser (gult), **skal** batteriet oplades

straks. Hvis ingen af indikatorerne lyser, er batteriet kørt tør for strøm, og genopladning er IKKE mulig.

Rekvirér derfor en ny batteriboks hos **danrehab a/s**.



Kører stolen skævt op/ ned ved regulering af sædehøjden ?

5. Undersøg, om stolens to actuatorer til højderegulering kører i takt.



Hvis **NEJ**, standses løfte- eller sænkeprocessen øjeblikkeligt ! **NØDFIR:** Tryk **let** og vedvarende med en kuglepen i nederste hul (B), indtil stolen når sin **laveste** højde. (Ved at trykke i øverste hul (A) hæves stolen.)

STYREBOKS →



Herefter **nulstilles** actuatorerne på følgende måde, når stolen er i absolut **laveste** position: Tryk håndbetjeningens NED-knap i bund, og hold den nede i ca. 10-15 sekunder. Herved skulle de to løfte-actuatorer atter blive synkroniseret. Prøv derefter at hæve stolen, og hvis de to løfte-actuatorer stadig ikke følges ad, gentages processen. Hvis det ikke løser problemet, returneres stolen til **dan-rehab a/s** til reparation.

Oplades batteriet ikke ?

6. Kontrollér, at alle stik sidder rigtigt. Hvis de gør det, så

- Tjek, om batteriladeren lyser orange. Hvis den lyser grønt under opladning af en stol, som ikke fungerer, kan det skyldes
- ENTEN at opladeren er defekt – som udskiftes i givet fald
- ELLER at batteriet er defekt og derfor skal udskiftes.
- ELLER at ledningen fra styreboksen til ladestikket på stolen skal udskiftes. Dette testes ved at afmontere den grå ladeledning i styreboksen og sætte laderen direkte i styreboksen. Lyser laderen nu gult, oplades stolen og der skal bestilles en ny ladeledning med varenr. ERGO-LBSK*

OBS ! Hvis stolen stadig ikke fungerer, sendes stolen (eller de defekte dele) til reparation hos:

danrehab a/s · Vejlevej 15 , Ølholm · DK-7160 Tørring

Teknisk Support: Tlf. 86 44 73 55.