



## Quick Guide

# All Connect

All Connect, tilbehør til PullAid

## Vejledning



Figur 1:  
Påsat All Connect til PullAid på velcrobåndene



Figur 2:  
Placer PullAid ved sengens hoved ende



Figur 3:  
Træk All Connect ud ved at trykke på PullAid panelets "Down" knap.



Figur 4:  
Kør ud indtil bespændings-beslagene når ned til lagenet.





Figur 6:  
Spænd alle beslagene med fingrene.



Figur 7:  
Træk i lagenet indtil beslagene når op til sengegavlen.

Figur 8:  
Løsn alle beslagene for at fjerne All Connect,

