



## Quick Guide

1. Kør PullAid ind til sengens hovedgærde, så den står tæt op af sengen. Lås hjulene.

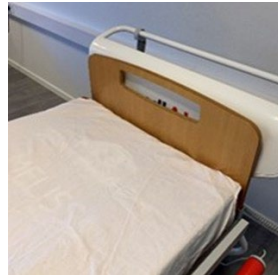

2. Sæt ledning i stikket – PullAid er tændt.

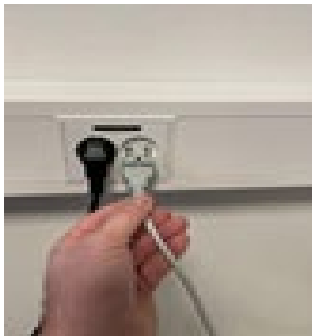

3. Fastgør lagnets velcro på PullAid rullens velcro.




4. Indstil sengens højde så hovedgærdet passer med overkanten på PullAid, og hæv madrassen så det flugter med PullAid.



## Quick Guide

5. Tryk på (up) på håndbetjeningen og borgeren trækkes på lagnet op til den ønskede placering i sengen.

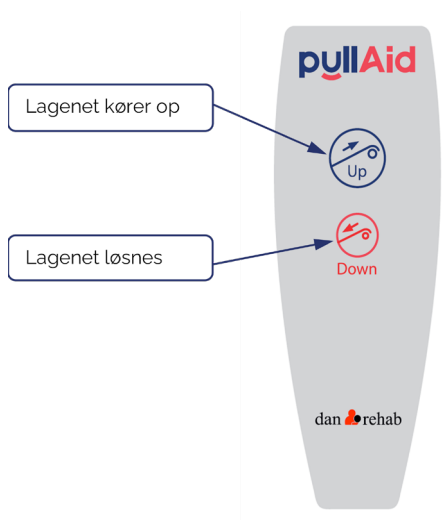

6. Borger køres op på plads. Bemærk kør ikke borger for langt op da det kan medføre vrid i nakken.



7. Lagnet løsnes lidt ved at trykke På nederste knap "Down".



8. Stikket tages ud af stikkontakten og placeres i holderen på PullAid.

