

Rengøring af Floorbed sengeheste.

Rengøring af sengeheste, kan eksempelvis gøres med forstøverflaske, indeholdende gængse desinficerende rengøringsmidler, eller afvaskes med fugtige klude og aftørres efterfølgende.

For at desinficere sengehestene. brug kun rengøringsmidler, der er beregnet til brug i sundhedssektoren. ikke slibemidler, skuremidler eller andre midler som kan beskadige sengehestene.

Brug ikke ætsende eller stærke syrer, rensebenzin, etc.

Hvis der er behov for det, kan nettet/betrækket afmonteres og kommes i vaskemaskinen på 60 grader celsius.

Dette gøres ved først at lyne betrækket af i underkanten af den øverste topbarre, indvendig i betrækket er der ligeledes en lynlås, der skal åbnes, og skummet i betrækket tages ud før det vaskes i vaskemaskine.

Nederst på betrækket er en "bundbarre" i løbegang på betrækket, denne tages ud ved at løsne/skrue de 2 umbraco-skrue ud, der er placeret i bunden af sengehestebeslagene (en i hver ende) se billede herunder. Bundbarren falder derefter ud af beslaget (tag én side af gangen, for barren ikke falder ned over tæerne), efterfølgende kan barren trækkes ud af løbegangen og betrækket/nettet kan derefter kommes i vaskemaskinen.

Må ikke bleges, tørre-tumbles eller stryges.



Lynlås øverst ved topbarre



Indvendig lynlås til skumdel



skruer i bund af sengeheste-beslag