

Rengøringsvejledning Floorbed

Rengøring & Desinfektion

- ⚠ Rengøring og desinfektion SKAL udføres af en kompetent person.
- ✓ Sengen skal frakobles strømforsyningen, når den rengøres eller desinficeres.
- ✓ Alle funktioner SKAL testes og godkendes af en kompetent person efter rengøring eller desinfektion.
- ✓ Sengen SKAL rengøres og desinficeres, før den genbruges til en anden patient.

Rengøringsinformation

- For at desinficere sengen, brug kun rengøringsmidler, der er designet til brug i sundhedssektoren.
- Brug ikke slibemidler, skrubbemidler eller andre materialer, der kan beskadige belægningen.
- Brug ikke ætsende stoffer, kaustiske eller stærke syrer.
- Brug ikke rengøringsmidler, der kan ændre strukturen eller adfærden af plastikken (benzin osv.).
- Rengør ved at tørre af med en fugtig klud.

OBS:

Sengen er ikke designet til vedligeholdelse i automatiske sengevaskere eller til rengøring med højtryk, sprøjtning, bruser eller damprensning.

Danrehab kan ikke holdes ansvarlig for nogen skade eller risiko for skade, hvis upassende rengørings- eller desinfektionsmidler anvendes.

Rengøringsprocedure

1. Fjern alt- tilbehør, madras osv.
2. Juster madrasplatformen til den højeste position og juster positionen af rygstøtten og fodstøtten for at give adgang til rengøring af alle platformens dele.
3. Frakobl sengen fra strømforsyningen.
4. Flyt sengen til det sted, hvor rengøringen skal finde sted, og lås sengens hjul.
5. Rengør som beskrevet i "Rengøringsinformation".

direkte oversat fra leverandørens vejledning IFU-FL2-002EN Rev 06



V.1 - 2026